

**Protokoll zur Gerätewartung an Ultraschallgeräten  
nach MPG und MPBetreibV**

Wartung			
<u>Betreiber (Arztstempel)</u>		<u>Hersteller / Vertreter</u>	
<b>Kd.Nr.</b>			
<b>1. Gerät</b>			
Typ/Modell: _____		Geräte-Nr: _____	
Hersteller: _____		Baujahr: _____	
Sonde 1:	SN:	Sonde 2:	SN:
Sonde 3:	SN:	Sonde 4:	SN:
Sonde 5:	SN:	Sonde 6:	SN:
<b>2. Sichtprüfung</b>			
Frei von Verschmutzung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Frei von mechanischen Defekten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Aufschriften gut lesbar	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Monitor ohne Einbrennspuren	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Typenschild vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Buchsen, Steckverbindungen, Netzkabel, Sondenummantelungen in Ordnung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>3. Elektrische Prüfung</b>			
Prüfgerät: _____		SN: _____	
		Messwert	Sicherheitsrelevante Mängel
Sichtprüfung			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Schutzleiterwiderstand ( $R_{max} \leq 0,3 \Omega$ )		$\Omega$	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Geräteableitstrom (Differenzstromverfahren) B/BF/CF $\leq 500 \mu A$		$\mu A$	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Netzspannung		V	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ersatz – Patientenableitstrom BF $\leq 5mA$ oder CF $\leq 50 \mu A$		<input type="checkbox"/> _____ mA <input type="checkbox"/> _____ $\mu A$	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>4. Funktionsprüfung der technischen Bildqualität</b> (Etwaige Mängel unter Punkt 5 dokumentieren!)			
Gerät funktionsfähig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Farb-Doppler funktionsfähig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Dokumentation funktionsfähig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Messfunktion funktionsfähig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Elektrische Sonden funktionsfähig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Akustische Linsen funktionsfähig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		(Bei bestehendem Kontakt zw. Hautoberfläche und Kristallkörper kann es zu Stromstößen kommen)	
Sektorsonden funktionsfähig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Eindringen / Tiefenausgleich in Ordnung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
PW/CW-Doppler funktionsfähig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		

**Protokoll zur Gerätewartung an Ultraschallgeräten  
nach MPG und MPBetreibV**

**5. Ergebnis**

- Keine Mängel
- Mängel; unter Berücksichtigung der Mängel ist das Gerät betriebsbereit und funktionsfähig
- Gerät darf nicht betrieben werden, da es erst eine Überprüfung und Wartung / Reparatur erfordert, aufgrund von möglicher Gefährdung von Patienten, Beschäftigten oder Dritten

Mängel benennen (inklusive Schallkopf/Sonden):

---

---

---

---

---

Unterschrift und Stempel Vertreter

Ort / Datum: \_\_\_\_\_                      Wartungsdatum: \_\_\_\_\_

Prüfer: \_\_\_\_\_                              Unterschrift: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
(Ansprechpartner)

**Eine Wartung ist aufgrund folgender Problematik an diesem Gerät nicht durchführbar (Erklärung):**

---

---

---

---

---

---

Unterschrift Hersteller / Vertreter